

## Инструкция по применению «Мочеприемника мужского латексного «ММ-АМТ»»

Мочеприемник разработан для мужчин, страдающих недержанием мочи и предназначен как для постоянного ношения, так и для временного использования.

Мочеприемник состоит из насадки-мочеулавливателя, клапана, резервуара со сливным устройством, фиксирующих колец (рис.1)

### Комплектность

1. Мочеприемник в сборе  
(насадка-мочеулавливатель, клапан, резервуар, трубка с пробкой) - 1 шт
2. Насадка-мочеулавливатель - 9 шт
3. Кольцо - 3 шт

Комплект рассчитан на применение в течение 10 суток, насадка применяется в течение 1 суток.

### Применение

Для одевания мочеприемника необходимо вынуть пробку из сливного устройства, частично, примерно на одну треть, раскатать насадку, растянуть двумя руками наружное отверстие и стенку насадки (рис.2) и в образовавшуюся воронку вложить головку пениса. Раскатав насадку до основания пениса (расстояние между головкой пениса и горловиной клапана должно быть - 1-2 см), сдавите рукой резервуар, так чтобы через открытое сливное отверстие вышел воздух, и в сдавленном состоянии резервуара второй рукой закройте пробкой сливное устройство, что обеспечивает плотное герметичное облегание пениса насадкой, что предотвращает подтекание мочи. При необходимости передвижения прикрепите мочеприемник к индивидуальному поясу, используя петли на горловине клапана и сливном устройстве (рис.3). При передвижении на коляске или ходьбе мочеприемник рекомендуется располагать вдоль складки живота и бедра или между бедер, так чтобы пробка находилась ниже клапана. Опорожнять мочеприемник рекомендуется при наполнении на 250-300 мл, максимальная вместимость резервуара - 500 мл. Опорожнять мочеприемник можно как в надетом состоянии, так и сняв с пениса. При необходимости повторного одевания мочеприемника повторите процедуру, описанную выше. В случае необходимости (если моча выделяется одномоментно очень большими порциями), для увеличения пропускной способности клапана, разберите мочеприемник, сняв уплотнительные кольца, укоротите ножницами смыкающиеся лепестки клапана (рис.4), соберите мочеприемник.

В перерывах между использованием рекомендуется мыть резервуар мочеприемника теплой водой, используя мыло или средства для мытья посуды. После этого необходимо промыть водой и опудрить внутреннюю поверхность резервуара тальком и высушить его при комнатной температуре.

Менять насадку-мочеулавливатель рекомендуется ежедневно; сняв фиксирующие кольца с горловины клапана, снимите использованную насадку, оденьте новую и закрепите фиксирующим кольцом.

Допускается дезинфекция мочеприемника 1% р-ром хлорамина в течение 30 минут при комнатной температуре.

Не допускается сушить мочеприемник на нагревательных приборах, солнце, обрабатывать маслами, кислотами, растворителями и др. веществами разрушающими резину.

Гарантийный срок эксплуатации - 10 суток

Гарантийный срок хранения - 4 года

